

POLVERIZZATORE ELETTRICO “SEVERO”

**DALLA PILLOLA ALLA POLVERE
IN POCHI SECONDI**

✓ **Niente più fuoriuscite e
contaminazione incrociata**

L'AEROSOL ricade all'interno
del bicchierino prevenendo anche
le minime perdite di farmaco

✓ **Veloce e facile da usare**

Inserito il farmaco nell'apposita
coppetta da 30 ml, bastano 8 secondi
(pillole normali) per polverizzarlo

✓ **Prevenzione delle lesioni
da sforzo ripetitivo**

Promuovere drasticamente
la riduzione dello sforzo
da parte degli operatori sanitari



Ergonomico



Igienico

**ESSENZIALE
IN TUTTE
LE STRUTTURE
SANITARIE!**

COME USARE

1.



Mettere le
compresse nel
Bicchierino (non
oltre la prima riga)

2.



Posizionare la
“testa di
frantumazione”
nel bicchierino
(non oltre la
prima riga)

3.



Aprire il coperchio
del Severo
premendo sul
pulsante metallico

4.



Posizionare il
bicchierino con la
“testa di
frantumazione”
nell'apposito vano

5.



Chiudere il
coperchio del
Severo con una
leggera pressione

6.



Premere il tasto di
alimentazione
in modo che il
processo di
frantumazione
inizi. Quando La
luce a LED diventa
verde il processo è
terminato

7.



Aprire il coperchio
e sollevare la “testa
di frantumazione”
Le compresse
sono ridotti in
polvere

8.



Prima di iniziare
una nuova
frantumazione è
consigliabile
pulire la testa di
frantumazione
al fine di prevenire
la contaminazione
incrociata

Dimensioni: H 21,7 x L 8,0 x P 7,0 cm
Peso: 1,5 kg
Ciclo di macinazione : 8 secondi per
pillole normali
Durata **della batteria** : 500 macinazioni
(circa 3 giorni con uso continuo)
Tempo di **carica** : 2 ore
Tensione: 12 Volt



0331 542053

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

VIVIAM
Soluzioni per la logistica medicale